

<b>TABLEAU DE DÉPANNAGE - QUESTIONS FRÉQUENTES</b>		
<b>Symptômes</b>	<b>Cause Possible</b>	<b>Solution</b>
<b>Alarmes</b>	Arrêt cardiaque ou ralentissement brutal de la fréquence cardiaque	<b>Apporter les premiers secours à l'enfant et appeler les services d'urgences</b>
	Les 2 détecteurs sont connectés alors que le bébé ne rampe pas encore	Connecter seulement un seul détecteur
	Un seul détecteur est connecté alors que le bébé peut ramper de l'autre coté du lit	Connecter les deux détecteurs
	Le sommier n'est pas rigide	Changer de sommier ou placer dessus une plaque contreplaquée
	Le matelas est trop rigide (polystyrène,...)	Changer de matelas
	Les détecteurs sensoriels sont mal placés	Suivre les instructions du guide d'utilisation
<b>Le délai de mise en route de l'alarme est trop long lors du test fonctionnel</b>	30 secondes semblent être une longue durée à attendre	Contrôler avec une montre SVP
	Le moniteur a détecté une autre influence dans l'environnement tel un courant d'air, un ventilateur, un système d'air conditionné, des vibrations, un jouet mobile...	Identifier et isoler la cause de cette perturbation
	Secousse, mouvement près du lit	Mettre le lit dans un environnement protégé de tout mouvement au sol.
<b>Pas de réponse lorsque l'on allume le moniteur</b>	Piles manquantes ou mal positionnées.	Contrôler que vous avez bien installé les 4 piles nécessaires au fonctionnement de BabySensell
<b>Alerte de faible autonomie des piles</b>	Les piles doivent être changées	Remplacer les piles

**Pour d'autres phénomènes ou mauvais fonctionnements, n'hésitez pas à nous contacter sur [www.btl-diffusion.com](http://www.btl-diffusion.com)**